

Textilní ochranná rouška.

Vyrobeno ze 100% bavlny.

Návod k použití.

1. Před nasazením roušky použijte dezinfekci rukou na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou.
2. Rouškou si zakryjte nos a ústa, ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem nejsou žádné mezery (nebo alespoň co nejmenší).
3. Během nošení se roušky nedotýkejte.
4. Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za novou.
5. Roušku sundávejte vždy zezadu za tkaničky
6. Před dalším použitím roušku sterilizujte – vyperte na vysokou teplotu a vyžehlete na nejvyšší stupeň.

Maska slouží jako prostředek, který snižuje riziko přenosu virů. Použitý materiál je schopný filtrovat přibližně 50% částic velikosti 0,2 mikronu. Výrobce negarantuje 100% ochranu před viry, ale maska může zastavit jemné kapénky ze slin, pomocí nichž se vir šíří.

Před prvním vypráním doporučujeme na koncích tkaniček udělat suky. Zabráníte tím roztřepování tkaniček při opakovaném praní.

